



Materialevenlige rense- og desinfektions-servietter imprægneret med en lav-alkoholholdig opløsning til hurtig aftørring.

## mikrozid® universal wipes green line

### Vores fordele:

- 100 % plastikfri servietter
- Meget bæredygtig og klimaneutral
- Maksimal materialekompatibilitet
- Virker på få sekunder
- Dermatologisk testet

### Anvendelsesområder

Produktet er velegnet til desinfektion af ikke-invasivt medicinsk udstyr og andre overflader. Vores alsidige desinfektionsservietter er også velegnede til desinfektion af følsomme kommunikationsenheder. Smartphones og tablets med hyppig håndkontakt kan eksempelvis behandles med mikrozid® universal *green line* uden risiko for skade på enhederne.

### Brugsanvisning

Tør overfladen grundigt af med kluden og lad desinfektionsvæsken virke. Sørg for fuldstændig fugtning af overfladerne. Sørg for, at alt synligt snavs er fjernet før desinfektion. Behandl kun små områder. Arealet, der kan behandles, afhænger af rumtemperaturen og af strukturen på den overflade, der skal desinficeres. Overhold hygiejneaspekter, når du åbner pakken. Sørg for, at låget lukkes efter brug.

I tilfælde af adenovirus og Mycobacterium tuberculosis skal overfladen holdes våd under hele kontakttiden.

Kun til professionel brug. Alle alvorlige hændelser relateret til produktet skal rapporteres til fabrikanten og den kompetente myndighed. Ikke beregnet til slutdesinfektion af semi-kritisk og kritisk medicinsk udstyr. Produktet kan også bruges uden handsker, hvis det ikke kræves af sikkerhedsdatabladet for infektionsbeskyttelse og arbejdssikkerhed.

### Microbiologisk effekt

Effektivitet	Koncentration	Kontaktid
<b>bakteriedræbende</b> <i>i henhold til VAHs retningslinjer med korte kontakttider</i> - beskidte forhold	klar til brug	2 min.
<b>bakteriedræbende</b> EN16615 - rene forhold	klar til brug	1 min.
<b>bakteriedræbende</b> EN13727 - beskidte forhold	klar til brug	15 sek.
<b>tuberkulicid</b> EN14348 - rene forhold	klar til brug	5 min.
<b>gædræbende</b> EN13624 - beskidte forhold	klar til brug	1 min.
<b>gædræbende</b> EN16615 - rene forhold	klar til brug	1 min.
<b>virusdræbende mod kappebærende vira</b> EN14476 - beskidte forhold	klar til brug	15 sek.
<b>begrænset spektrum af virusdræbende virkning</b> EN14476 - beskidte forhold	klar til brug	15 min.
<b>Norovirus</b> EN14476 - rene forhold	klar til brug	30 sek.
<b>Norovirus</b> EN14476 - beskidte forhold	klar til brug	60 sek.
<b>Polyoma SV40</b>	klar til brug	15 sek.
<b>Rotavirus</b> EN14476 - rene forhold	klar til brug	15 sek.

### Certifikater



# mikrozid<sup>®</sup> universal wipes green line

## Produktdata

### Sammensætning:

100 g opløsning indeholder følgende aktive stoffer:

17,4 Propan-2-ol, 12,6 g Ethanol (94 % w/w)

Mærkning i henhold til (EF) nr. 648/2004: < 5 % anioniske overfladeaktive stoffer.

## Særlige råd:

Brug desinfektionsmidler sikkert.

Læs altid etiketten og produktinformationen før brug.

Produktet er yderst kompatibelt med materialer som metaller og plast (undgå anvendelse på akrylglas og alkohol-følsom lak). Ved brug af alkoholholdige desinfektionsmidler skal du følge Arbejdstilsynets AT-vejledning: Arbejde med brandfarlige væsker. Holdes væk fra varme og antændelseskilder. Yderligere oplysninger er tilgængelige ved henvendelse. Med passende håndtering garanterer schülke en holdbarhed på 3 måneder efter åbning af emballagen

Følgende størrelser er tilgængelige:

- mikrozid<sup>®</sup> universal vådservietter greenline (6X114 servietter 18 X20 cm)

## Relateret produkt

- mikrozid<sup>®</sup> sensitive wipes

## Miljøoplysninger

schülke fremstiller produkter økonomisk og med avancerede, sikre og miljøvenlige produktionsmetoder, samtidig med at vores høje kvalitetsstandarder opretholdes.

## Ekspertudtalelse og information

Besøg vores hjemmeside for en oversigt over al tilgængelig litteratur / rapporter om produktet: [www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)

For individuelle spørgsmål:

Kundeservice

telefon +45 70 266 244

[info.wetwipe@schuelke.com](mailto:info.wetwipe@schuelke.com)

## Information til bestilling

Vare	Leveringsform	Varenr.
mikrozid universal-vådservietter green line Softpack (114)	6 / karton	efter anmodning



**schülke headquarter**  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt,  
Germany  
Phone +49 40 52100-0  
Fax +49 40 52100-318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[info@schuelke.com](mailto:info@schuelke.com)

**Dansk distributør**  
Wet Wipe A/S  
Vallensbaekvej 65  
2625 Vallensbaek  
Denmark  
Phone +45 70 266 244  
Fax: +45 70 266 233  
[www.wetwipe.eu](http://www.wetwipe.eu)  
[info.wetwipe@schuelke.com](mailto:info.wetwipe@schuelke.com)

Schülke & Mayr GmbH holds a Manufacturer's Authorisation according to sect 13 para 1, German Drug Law and Certificates of GMP Compliance for medical products.