

Engangsmaske / Mundbind

Standard : EN14683:2019+AC:2019

Instruktion

Læs instruktionerne omhyggeligt, inden mundbindet anvendes. Ved korrekt brug kan dette produkt mindske mængden af fine partikler eller bakterier, som brugeren indånder. Fejlagtig brug kan forårsage alvorlig sygdom.

Sådan påfører du mundbindet:

1. Vask hænderne inden masken tages i brug.
2. Mundbindet vendes med den farvede side udad. Placer stropperne bag eller over ørerne.
3. Dæk mund og næse helt, og sørg for, at mundbindet slutter tæt.
4. Form metalbøjlen, så den passer til din næses form.
5. Efter brug fjernes mundbindet bagfra ved at holde i stropperne med rene hænder. Smid mundbindet i en lukket affaldsspand uden at røre den på forsiden.

Kontorland
...alt til kontoret